

## Panel de Drogas - Instant-View



### DESCRIPCIÓN

El **Panel de Drogas en Orina Instant-View** es un inmunoensayo cualitativo para **detectar la presencia de 2 hasta 12 diferentes drogas** y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte específicos, en un solo ensayo. Existen diferentes presentaciones que varían de acuerdo a la cantidad y tipos de parámetros (drogas) capaces de detectar. A cada droga le corresponde un resultado independiente, el cual es identificado en la ventana de resultados ubicada en el centro del cassette.

Registro sanitario: **0025R2017 SSA**



## **BENEFICIOS**

- Resultados en 5 minutos.
- Más de 24 combinaciones de diferentes drogas disponibles.
- Detecta de 2 hasta 12 diferentes drogas en una misma muestra de orina.
- Altamente confiable y preciso.
- Fabricado en E.E.U.U.

## **Parámetros Disponibles**

- Anfetamina (AMP)
- Barbitúricos (BAR)
- Benzodiacepinas (BZD)
- Cocaína (COC)
- Marihuana (THC)
- Morfina (Opiáceos) (OPI)
- Ketamina (KET)
- Fenciclidina (PCP)
- Propoxifeno (PPX)
- Oxycodona (OXY)
- Antidepresivos Tricíclicos (TCA)
- MDMA (XTC)
- Metadona (MTD)
- Metanfetamina (MET)

## MODO DE EMPLEO

- Recolecte una muestra de orina considerable de la persona.
- Inmerse la prueba de su elección en la muestra de orina de 5 a 10 segundos y después coloque la prueba en un trapo a secarse. O si lo prefiere, utilice un gotero para recolectar la muestra y aplique al menos 5 gotas a cada tira hasta mojarlas bien.
- Interprete los resultados en un plazo de 3 a 5 minutos.

